


Masque alternatif tissu 50 lavages

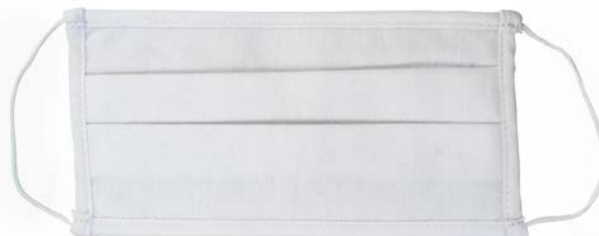

Type :

Masque alternatif tissu 50 lavages, Grand public, Type 1

Description :

Masque en tissu 50 lavages, Catégorie 1 (90% d'efficacité), grand public.

Masque barrière qui respecte la norme **AFNOR** 
Nos masques sont validés par la DGA 
 (Direction général de l'Armement)

Couche extérieur : toile déperlante 100% polyester
 Couche intermédiaire : toile serré 100% polyester
 Couche intérieur : Jersey 100% coton

Avantage :

Boucle élastique d'oreilles résistante, non irritante et douce.

Nous fournissons de nombreuses entreprises parmi lesquelles Intermarché mais aussi des institutions publiques (Mairies d'Ajaccio, Pontoise, La Ciotat ...), La principauté de Monaco, le Grand Duché du Luxembourg, La Région Normandie, différents EHPAD et Pharmacies.

NOTICE MASQUE BARRIÈRE



Masque barrière qui respecte la norme **AFNOR SPEC S76-001 2020** du 27 mars 2020.

- **Couche extérieure**
Toile déperlante 100% polyester
- **Couche intermédiaire**
Toile serré 100% polyester
- **Couche intérieure**
Jersey 100% coton

- ▶ Le masque doit être **lavé à 60° avant la première utilisation**, il faudra toujours le laver à cette température en machine **50 fois maximum**. **Le séchage** doit se faire en **tambour**.
- ▶ L'efficacité du masque est de **4 heures**. Après cette limite, le masque doit être lavé.
- ▶ **Avant de mettre un masque, se laver les mains** à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- ▶ Appliquer le masque de façon à **recouvrir le nez et la bouche**.
- ▶ Il faut **éviter de toucher le masque**. En cas de contact, se Laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- ▶ Pour retirer le masque, **l'enlever par derrière, ne pas Toucher l'avant du masque**.

Ce dispositif n'est pas ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masque chirurgical), ni un équipement de protection Individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masque filtrants de type FFP2).

COMMENT METTRE SON MASQUE ?

